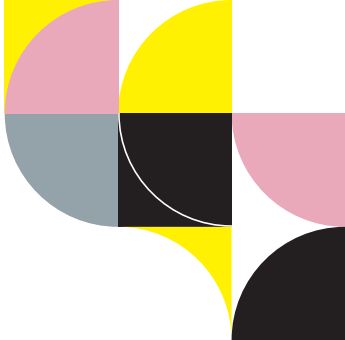


ARTICULATOREN

CANDULOR.

Wij begrijpen protheses sinds 1936.

Articulatoren voor volledige,
gedeeltelijke en hybride protheses
en implantaatgedragen protheses

Pocket Portfolio

De CANDULOR Pocket Portfolio biedt u een compact
en eenvoudig overzicht over de articulatoren en hun
bijzonderheden en wijze van gebruik.



ARTICULATOREN



CA 3.0

CA 3.0 LARGE



Materiaal Geëloxeerd aluminium



Eigenschap Zorgt voor een eenvoudig, fysiologisch verloop van bewegingen Technische gegevens



Technische gegevens

- Driehoek van Bonwill: 110 mm
- Hoek van Balkwill: 25°
- Retrusiebaan: 1,5 mm
- Aanslag voor Immediate Side Shift: 0 – 2,5 mm, vast
- Helling van de gewrichtsbaan: instelbaar van 0° – 60°
- De articulatoren CA 3.0 en CA 3.0 LARGE verschillen in opbouwhoogte.

Voordelen




Grote precisie mogelijk door natuurlijke simulatie van het kaakgewricht en realisatie van een occlusale vrije ruimte door de natuurgetrouwe dubbele conus.



Veelzijdig bruikbaar, want geschikt voor de volledige prothetiek en daarmee ook voor alle gangbare opsteltechnieken. In combinatie met onze reeksen laterale elementen Condyliform II NFC⁺ ideaal voor de opsteltechniek volgens Gerber.



Nauwkeurige opstellings- en oriënteringshulp met geïntegreerde geleidingsgroef, waardoor de elastieke band, incisaalpuntwijzer en het occlusievlak op één niveau liggen.

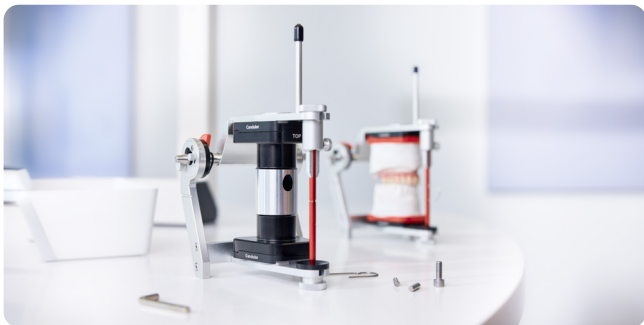

Gemakkelijker werken door het geïntegreerde splitcastsysteem.

Bewegingen



Protrusiebeweging



Laterale beweging en
beweging van Bennett



Immediate side shift (ISS)
beweging



Retrussiebeweging

Accessoires



1. Facebow-adapter L/R

Voor het overbrengen van producten van derden (facebow) in de CANDULOR scharnieren

2. Adapter gezichtsbooghouder CA 3.0 LARGE

3. Facebowhouder

4. Instrumentenhouder met insteltafel

(voor Candulor platenset)

5. Instrumentenhouder for Splitex®

(voor Splitex® platenset)

GELIJKSCHAKELING



Door gebruik te maken van het hulpmiddel voor gelijkschakeling kan de CA 3.0 LARGE op een opbouwhoogte van 126 mm worden aangepast en met de Artex®-articulatoren worden gelijkgeschakeld.

*compatibel met Artex BN, Artex CN, Artex CT, Artex CPR, Artex CR;
Splitex® en Artex® zijn geregistreerde merken van Amann Girrbach GmbH,
75177 Pforzheim, Duitsland

Van het laboratorium...



- Voor meer efficiëntie en rendement binnen de tandheelkundige workflow.

... naar de tandartspraktijk



- Werkprocessen worden eenvoudiger: in de dentale workflow kunnen de modellen tussen laboratorium en praktijk worden doorgegeven zonder de articulator
- Minder foutgevoeligheid: door de gelijkschakeling van de articulatoren kunnen fouten in de overdracht worden tegengaan.

Eenvoudig kalibreren



Articulatoren zijn perfect gekalibreerd



Onnauwkeurigheden in de uitlijning kunnen gemakkelijk zichtbaar worden gemaakt met de gedeelde centreersleutel

Accessoires voor de gelijkschakeling



1. Platenset voor Splitex®
2. Centreersleutel compatibel met Splitex®
3. Modelplaten kunststof voor Splitex®
4. Bevestigingsplaten voor Splitex®-modelplaten (Ø 35 mm)

Een keer proberen?
Wij geven u graag advies.

Candulor Dental GmbH

Am Riederngraben 6


D-78239 Rielasingen-Worblingen


T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candulor.de

W candulor.com

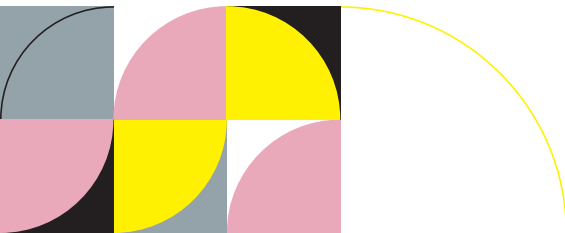

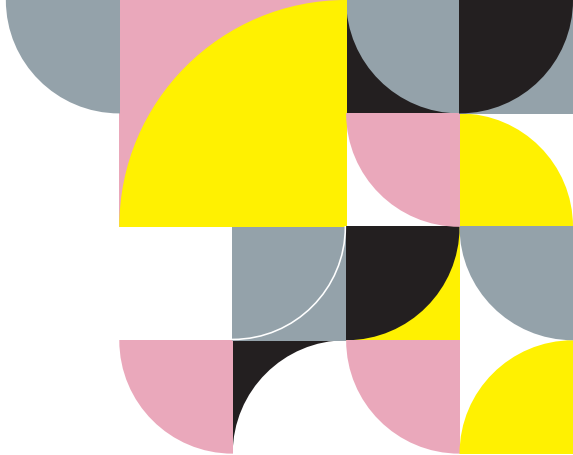

763334/nl/2023-12-01

CANDULOR. HIGH END ONLY.